

# SilverStream

Solution 

## تعليمات



® SilverStream هو محلول منظم عالي التوتر، مع صفات هيدروجل ورائحة عطرية، للحفاظ على الرطوبة وإضافتها وعلاج الجروح. ® SilverStream هو محلول صاف، عديم اللون، محمي من التلوثات الجرثومية عبر تركيز منخفض لأيونات الفضة، ومزود بزجاجات 500 مليلترا، 250 مليلتر و 100 مليلترا.

### هدف الاستخدام ودلالات الاستخدام :

® SilverStream معد للاستخدام تحت رقابة معالج طبي محترف لعلاج الجروح وترطيبها، مثل قرحة الاستلقاء بدرجات IV، - إقرحة الركود (Stasis ulcers)، قرحة السكري في الرجلين، جروح بعد العملية الجراحية، حروق من الدرجتين الأولى والثانية، جروح، خدشات، وتهيجات جلدية طفيفة

### إرشادات استخدام عامة :

مُعدّ للعلاج و الترطيب عبر صبّ محلول SilverStream مباشرةً من الزجاجات، وضعه باستخدام محقنة،  
SilverStream رشّه على الجرح باستخدام قنينة بخاخ، وضعه مع ما هو مُعدّ لإتاحة الغسل أو عبر السكب على شاشة/  
ضمادة أو إسفنجة .  
ضع المحلول 1-2 مرة يوميا ة أو حسب إرشادات الطبيب.  
قبل كل غيار، يتم شطف الجرح بالماء المقطر أو بالماء المقطر مع الصابون.  
قبل إزالة الشاش / الضمادة أو الإسفنج ، رطبها باستخدام SilverStream حل لإزالة أسهل. قبل إزالة الشاش / الضمادة أو الإسفنج ، رطبها باستخدام SilverStream حل لإزالة أسهل.

ملاحظة: يمكن تطهير الجرح إذا وُضع ® SilverStream باستخدام إبرة G

### تحذيرات وتنبهات

- لا تستخدم سوى القنينة غير المتضررة
- لا تستخدم/ي مع المرضى الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة لكحد ال
- أوقف/ي الاستخدام إذا نشأ تهيج
- امتنع/ي عن استخدام المحلول المعكّر أو ذي اللون
- احم/ي الزجاجات من الاتصال المباشر بالجرح. يجب إتلاف الزجاجات التي لامست الجرح بعد الاستخدام مباشرةً
- للاستخدام لمريض واحد فقط
- إذا غلقت القنينة بعد الاستخدام الاشارة وكانت فتحتها محمية من التلوث، يمكن إعادة استخدام المحلول خلال 28
- يوما من فتح الزجاجات للمرة الأولى
- يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية في مكان جاف.
- يمكن رمي الزجاجات الفارغة في سلّة المهملات. يجب التخلص من الزجاجات المحتوية على محلول في المكان المناسب

- لا تضع/ي أكثر من 700 مليلترًا من محلول SilverStream® خلال 24 ساعة

#### المركّبات :

ماء للحقن ( Water for injection ), غليسيرول (غليسيرين), سوربيتان مونو لورت (توين 20), تريس, منثول, و نترات الفضة 0.01% (w / v)  
تحتوي كل عبوة على اثنا عشر (12) زجاجات كل منها 250 مليلترا, اثنا عشر (12) زجاجات كل منها 500 مليلترا, أو (24) زجاجة كل منها 100 مليلتر

يحتوي كل مل على الفضة الأيونية المضادة للميكروبات على شكل نترات الفضة 0.01% (وزن / حجم)

الرموز:

إليك وصف الرموز الغرافيكية الظاهرة على لاصقة® SilverStream :

احذرا!	
استعن/ي بإرشادات الاستخدام	
المنتج	
حافظ/ي على الزجاجات بعيداً عن ضوء الشمس المباشر	
حدود درجات الحرارة	
استخدم قبل تاريخ	
مُعقم عبر استخدام تقنية التعبئة العقيمة	
يُمنع التعقيم ثانية	
رقم الحزمة/ #اللوت	
يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال	
باستخدام إبرة 19G ضغط الوضع ~10 psi	
جهاز طبي	



**SilverStream Medical Ltd.**

Company Reg. No. 513160986

26 Shabazi St.

Rosh Ha'Ayin 4802126

Israel

Phone: +972 3 9194334

[info@silverstreammed.com](mailto:info@silverstreammed.com) | [www.silverstreammed.com](http://www.silverstreammed.com)

Previous company name: EnzySurge Ltd.