



הוראות שימוש

אמ"ר מס: 11550401



SilverStream® היא תמיסת בופר היפרטונית, עם תכונות הידרוג'ל וריח נעים, לשמירת והוספת לחות וטיפול בפצעים. SilverStream® היא תמיסה צלולה, חסרת צבע, המוגנת מזיהום חיידקי על ידי ריכוז נמוך של יוני כסף. היא מסופקת בבקבוקים של 100 מ"ל, 250 מ"ל ו- 500 מ"ל.

שימוש יעודי והתוויות לשימוש:

SilverStream® מיועדת לשימוש תחת השגחה של מטפל רפואי מקצועי לטיפול ולחלוח של פצעים כמו פצעי לחץ בדרגות I-IV, כיבי עמדון (Stasis ulcers), כיבי סוכרת ברגלים, פצעים לאחר ניתוח, כוויות מדרגה ראשונה ושנייה, חתכים, שריטות וגירוי עור קלים.

הוראות שימוש כלליות:

SilverStream® מיועדת לטיפול ולחלוח על ידי מזיגה של תמיסת SilverStream® ישירות מהבקבוק - באמצעות מזרק פלסטי או מזלף / טפטפת, שימוש על הפצע בעזרת בקבוק ספריי, השמה עם התקן המיועד לאפשר שטיפה או על ידי הרטבת הפד/ גזה / תחבושת או ספוג. שים / פעם אחת עד פעמיים מדי יום, לפי הוראת הרופא. בין החלפת חבישה של SilverStream, שטפו את הפצע במים או במים וסבון. לפני הסרת הגזה/החבישה או הספוג, יש להרטיב את החבישה עם סילברסטרים להסרה קלה יותר.

הערה: הפצע ניתן לניקוי אם SilverStream® יושם בעזרת מחט 19G (לחץ השמה של 10 psi ~).

אזהרות והתראות:

- לשימוש חיצוני בלבד. המנע ממגע עם העיניים.
- השתמש/י רק בבקבוק שלא ניזוק.
- אל תשתמש/י במטופלים עם היסטוריה של רגישות יתר לאחד מהמרכיבים.
- הפסק/י השימוש אם מתפתח גירוי.
- הימנע/י משימוש בתמיסה עכורה או בעלת צבע.
- הגן/י על הבקבוק ממגע ישיר עם הפצע. בקבוקים שבאו במגע ישיר עם הפצע יש להשמיד לאחר השימוש.
- לשימוש בחולה אחד בלבד.
- אם הבקבוק נסגר מיד לאחר השימוש והפתח שלו מוגן מזיהום, ניתן להשתמש שימוש חוזר בתמיסה תוך 28 ימים מפתחת הבקבוק לראשונה.
- אחסן את התמיסה בטמפ' של עד 30 מעלות צלזיוס.
- בקבוק ריק ניתן לזרוק לפח האשפה. בקבוק שמכיל תמיסה חייב להיות מסולק לאתר המתאים.
- אל תשימי/י יותר מ 700 מ"ל של תמיסת SilverStream® בתוך 24 שעות.

מרכיבים:

מים להזרקה (WFI), גליצרול (גליצרין), סורביטן מונולאורט (טוויין 20), טריס, מנתול וכסף ניטרטי 0.01% (w/v)
כל מ"ל מכיל כסף יוני אנטי-מיקרוביאלי בצורה של כסף ניטרטי (משקל/נפח) 0.01%

כל אריזה מכילה שניים עשר (12) בקבוקים של 250 מ"ל או 500 מ"ל או עשרים וארבעה (24) בקבוקים של 100 מ"ל ועלון הוראות שימוש המהווה חלק מתווית הבקבוק.

סמלים:

להלן תיאור הסמלים הגרפיים המופיעים על תווית SilverStream®:

זהירות	
היעזר/י בהוראות השימוש	
יצרן	
שמור/י את הבקבוקים הרחק מאור שמש ישיר	
מגבלת טמפרטורה	
השתמש/י לפני תאריך	
מעוקר על ידי שימוש בטכנולוגית מילוי אספטי	STERILE A
אין לעקר שנית	
קוד אצווה/ מס' סחורה	LOT
להרחיק מהישג ידם של ילדים	
מחט G19 לחץ השמה של ~10 psi	
מכשיר רפואי	MD



SilverStream Medical Ltd.

Company Reg. No. 513160986

26 Shabazi St., Rosh Ha'Ayin 4802126, Israel

Phone: +972 3 9194334

info@silverstreammed.com | www.silverstreammed.com

Previous company name:

EnzySurge Ltd.