

# SilverStream

Solution

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



**SilverStream®** - это буферный раствор с приятным запахом, предназначенный для лечения ран и поддержания уровня влажности раны, SilverStream® - это прозрачный бесцветный раствор, который защищает от микробного загрязнения низкой концентрацией ионного серебра, поставляется в бутылках по 100 мл, 250 и мл 500 мл .

## **ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Предназначен для механической очистки и удаления посторонних материалов из раны, включая микроорганизмы и участки некроза от ран, такие как I-IV стадии пролежней, варикозных язв, язв диабетической стопы, послеоперационные раны, ожоги первой и второй степени, порезы и незначительные раздражения кожи. Использовать под наблюдением медицинского работника.

## **ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

SilverStream® разработан для облегчения заживления ран, а также функционирует как хороший увлажнитель, используя один из 4 способов нанесения непосредственно из бутылки. (1) Нанесение с помощью шприца или колбы. (2) Применение устройства, предназначенного для спринцевания или промывания. (3) Распыление на рану с помощью аэрозольного баллончика. (4) Наливая на марлю/повязку или губку.

Применять 1-2 раза в день; по указанию врача. Между сменами повязки SilverStream®, рану промывают водой или водой с мылом. Перед снятием марли/повязки или губки, смочите раствором SilverStream® для облегчения снятия.

**Примечание:** Рана может быть очищена SilverStream®, если нанести иглой 19-22G (давление прижатия —10 фунтов на кв.в).



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Только для наружного применения. Избегайте попадания в глаза.
- Используйте только неповрежденную бутылку.
- Не используйте для пациентов с гиперчувствительностью ни к одному из ингредиентов в анамнезе.
- Прекратите использование, если возникнет раздражение.
- Избегайте использования мутного или окрашенного раствора.
- Бутылка должна быть защищена от прямого контакта с раной.
- Использование только для одного пациента.
- Хранить в сухом месте при температуре ниже 30°C
- Если бутылку закрыть сразу после использования и верхняя часть бутылки защищена от загрязнения, раствор может быть повторно использован в течение 28 дней с момента первого вскрытия.
- Не наносите более 700 мл раствора SilverStream® в течение 24 часов.

## ИНГРЕДИЕНТЫ


Ингредиенты включают воду для инъекций (Water for injections), глицерин, Сорбитанмонолаурат (Полисорбат 20), Трометамол, Ментол и нитрат серебра 0.01% (масса / объем).

Каждый мл содержит противомикробное ионное серебро в форме нитрата серебра 0,01% (масса/объем).

**Каждая упаковка содержит двенадцать (12) флаконов по 250 мл или двадцать четыре (24) флакона по 100 мл или двенадцать (12) флаконов по 500 мл и инструкцию по применению, которая является частью этикетки флакона.**

## ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

Ниже приводится описание графических символов, которые появляются на этикетке SilverStream®:

	Осторожно!
	См. инструкцию по эксплуатации/ руководство
	Производитель
	Храните вдали от прямого солнечного света
	Температурный диапазон
	Дата истечения срока
	Стерилизовано методами асептической обработки
	Не стерилизовать повторно
	Код партии
	Хранить в недоступном для детей месте
	Игла 19–22G (давление прижатия — 10 фунтов на кв. дюйм)
	Медицинское изделие



**SilverStream Medical Ltd.**

Company Reg. No. 513160986

26 Shabazi St., Rosh Ha'Ayin 4802126, Israel

Phone: +972 3 9194334

[info@silverstreammed.com](mailto:info@silverstreammed.com) | [www.silverstreammed.com](http://www.silverstreammed.com)

Previous company name: EnzySurge Ltd.